

## ■お手入れ方法

- 1.水分や汚れを拭き取ります。(図-15)
  - しつこい汚れは、薄めた中性洗剤に浸した布を固くしぼって拭き取ります。その後、洗剤分等を乾いた布でよく拭き取ります。
- 2.3ヶ月に1度、もしくは適宜に別売りの潤滑剤を開閉ロックピンにスプレーしてください。(図-16)
  - 側面開閉ロックピンの動きがスムーズになります。

《 推奨品 》

株式会社タイホーコーザイ 潤滑剤PN55



**注意** 本体損傷の原因となります。

- 金属製のわし、ブラシなどは使わないでください。
- 磨き成分の入った洗剤、漂白剤は使わないでください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。



- グリップ、脚ゴム等は磨耗したり、破れる等破損した場合は使用を中止し、新しい部品と交換してください。
- 交換用の部品は、当社またはお買い求めの販売店でご購入ください。

## ■保管方法

- 1.お手入れ方法に従った後、左右のフレームを閉じます。
- 2.室内の湿気の少ない、風通しのよいところに保管してください。

### ●フレームの閉じ方

- 1.左右の開閉ロックピンを引き左右のフレームが動くことを確認します。(図-17)
  - ※ロックピンが引き抜きにくいときは、フレームを開閉の方向に少し動かして引き抜いてください。
- 2.左右のフレームを内側に折りたたみます。(図-18)

### 仕様

品名:軽量マグネシウム合金製歩行補助器具「MgウォーカーⅢ型」  
材質:【フレーム・左右・前後つなぎパイプ、下管】マグネシウム合金、アルミニウム、【グリップ】エラストマ樹脂、【脚ゴム】エラストマ樹脂、【インサートロックピン】真ちゅう・樹脂、【スライドロックナット】アルミニウム、【側面開閉ロックピン】真ちゅう・樹脂、【開閉限度ピン】真ちゅう  
重量:(約)【S】1.45kg 【M】1.55kg  
寸法:(約)【S】横幅 53.5cm(グリップ内幅35.5cm)、奥行(展開時)44.0cm、(折りたたみ時)17.0cm、高さ 63.0~74.0cm  
【M】横幅 56.0cm(グリップ内幅43.5cm)、奥行(展開時)44.0cm、(折りたたみ時)11.0cm、高さ 74.5~85.5cm  
垂直耐加重:共通(約)(4点接地時)190kg


※上記仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

【保証規定】別途添付の保証書をご覧ください。


### 【耐用年数】

4年:設計構造、使用素材、使用環境などをふまえ、本書記載の使用状況下で、製造者が予測している耐用年数です。4年経過後、ご使用される場合は、当社(裏面記載)もしくはお買い求めの販売店にて点検していただきますようお願いいたします。


(図-15)

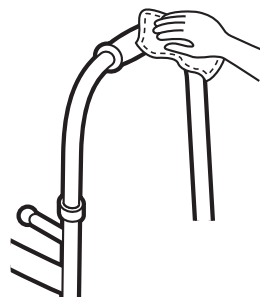


(図-16)

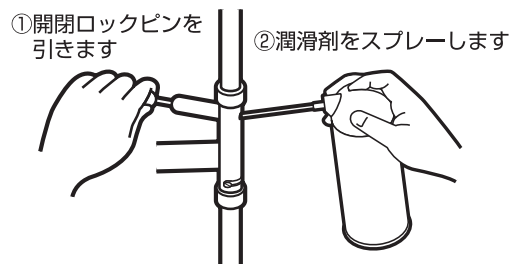

(図-17)

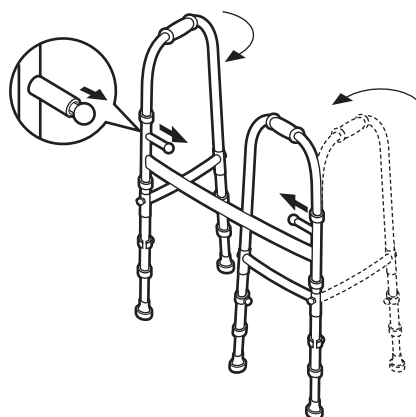

(図-18)

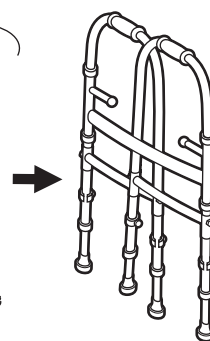

## ■ 製造販売元

田辺プレス株式会社

〒955-0814 新潟県三条市金子新田984-21

電話: 0256-32-1492 FAX: 0256-35-8095

e-mail: tbpress@ginzado.ne.jp

2017.11